

Pakkevejledning - op til 5 stk. fæcesprøver

De nye forsendelsesløsninger fra Dianova er specielt udviklet til dyrlæger og gør det nemt at sende diagnostiske prøver, som opfylder lovgivningens krav.

Dette er væsentligt for dig som kunde, da det er afsenders ansvar, at diagnostiske forsendelser opfylder UN3373 reglerne. Er reglerne ikke opfyldt, hæfter afsender for et evt. erstatningsansvar.

UN3373 reglerne

En forsendelse af diagnostiske prøver skal bestå af en primæreballage, en sekundær- og en ydereballage. Primær- eller sekundæreballagen skal være trykprøvet til at kunne modstå en trykforskel på 0,95 bar. Primær- og sekundæreballagen skal være tætte.

Der skal være et sugeindlæg ved primæreballagen, som minimum kan opsuge den samlede væske, der sendes.

Ydereballagen skal mærkes med faremærkat UN3373 "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B". Det er afsenders ansvar, at lovgivningen overholdes. Derfor er emballageløsninger fra Dianova testet og godkendt af Teknologisk Institut.

Sådan pakkes fæcesprøverne til postforsendelse

1. Bøtterne med prøvematerialet i lukkes tæt. Prøverne lægges i forseglingsposen. Der kan være op til 5 prøver i en pose.
2. Sugeindlægget lægges oven på prøverne.
3. Fjern beskyttelsesstrimlen fra forseglingsposen, og pres den fast sammen. Forseglingsposen lægges i boblekuverten mellem det bøjede papstykke
4. Indsendelsesblanketen udfyldes og vedlægges. Kuverten lukkes til og afleveres i postkassen eller på posthuset.

1.



2.



3.



4.

